



AutoShield™ Aguja BD

Guía de formación

con protector de
seguridad para plumas



Agujas de seguridad

29 G x 8mm




Disponible también de 5mm

Envase exterior

Girar hasta romper el precinto




Desinfectar la goma del cartucho de la pluma con una toallita de algodón

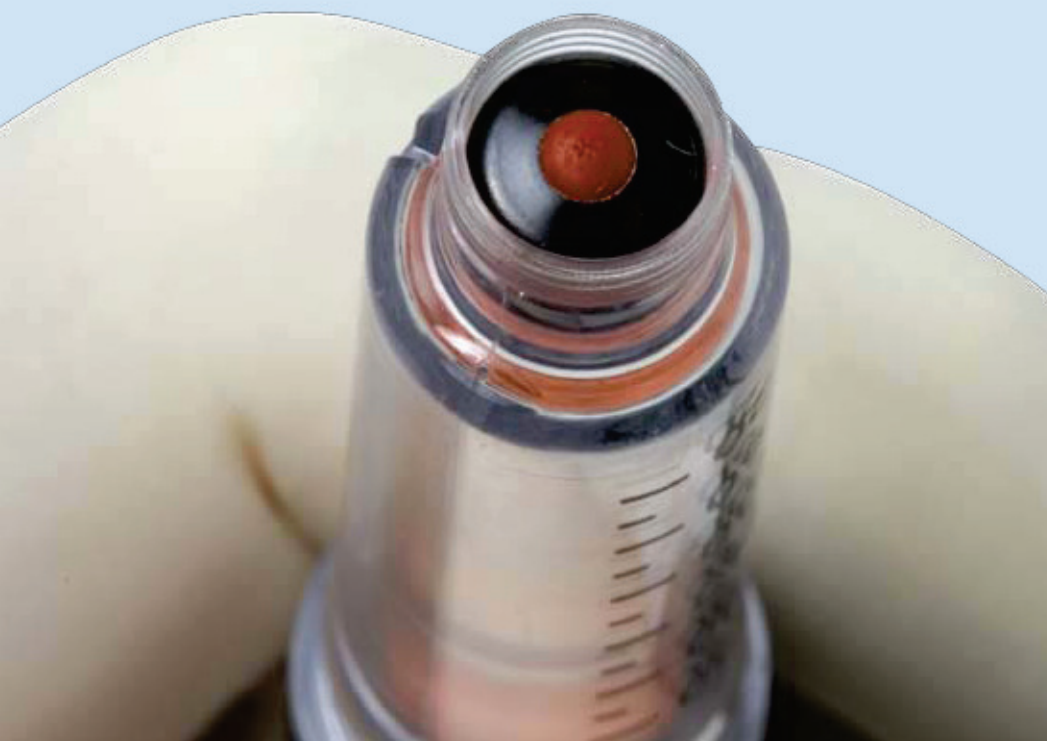

Colocar la aguja en la pluma

1. Mantener la pluma en posición horizontal e insertar el cartucho de la pluma en el clinidro de plástico que contiene la aguja
2. Enroscar la aguja en el sentido de las agujas del reloj hasta que se note una resistencia
No forzar demasiado.

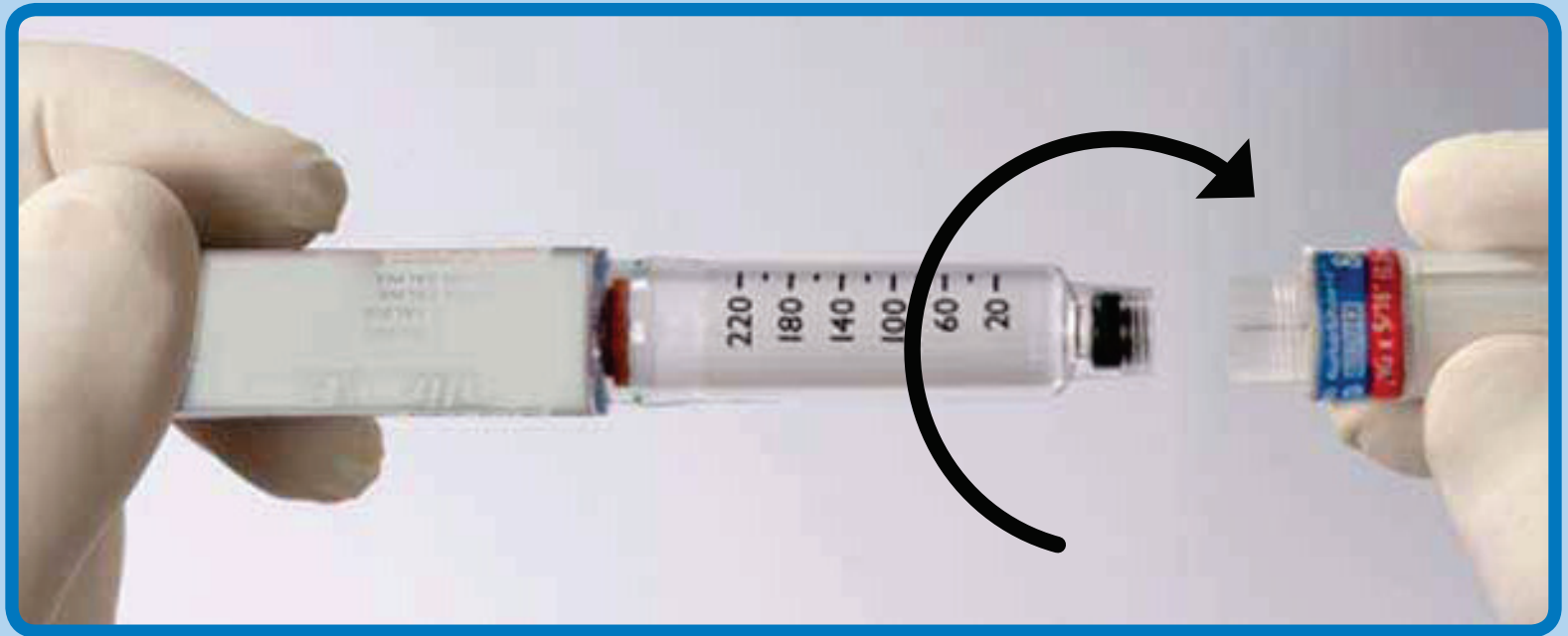

**El protector de
plástico se retrae
durante la inyección**

Aguja




Bloqueo automático del mecanismo de seguridad

Antes de la inyección



Después de la inyección

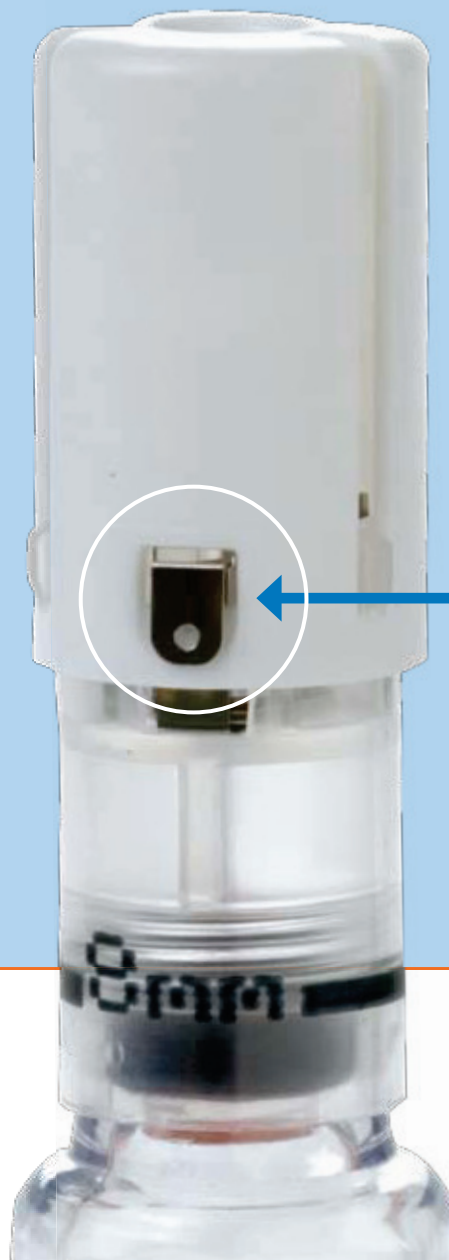

Lengüetas metálicas



Purgar la pluma



El líquido debe fluir
desde la aguja



Debe aparecer
una gota de líquido en
la punta de la aguja



**Abdomen:
zona de inyección
recomendada**

**Sujetar la pluma con
la palma de la mano**



CORRECTO



PRECAUCIÓN: Una técnica de inyección poco apropiada puede dar lugar a pinchazos accidentales

Técnica recomendada para agujas de 8mm y 5mm:

- No utilizar la técnica del pellizco
- Insertar la pluma formando un ángulo de 90° con la piel



CORRECTO




ÁNGULO INCORRECTO

Técnica alternativa solo para agujas de 8mm:

- Utilizar la técnica del pellizco cogiendo un área amplia de la piel
- Insertar la pluma formando un ángulo de 90° con la piel




**CORRECTO, 2.5 cm
de piel entre los dos dedos**

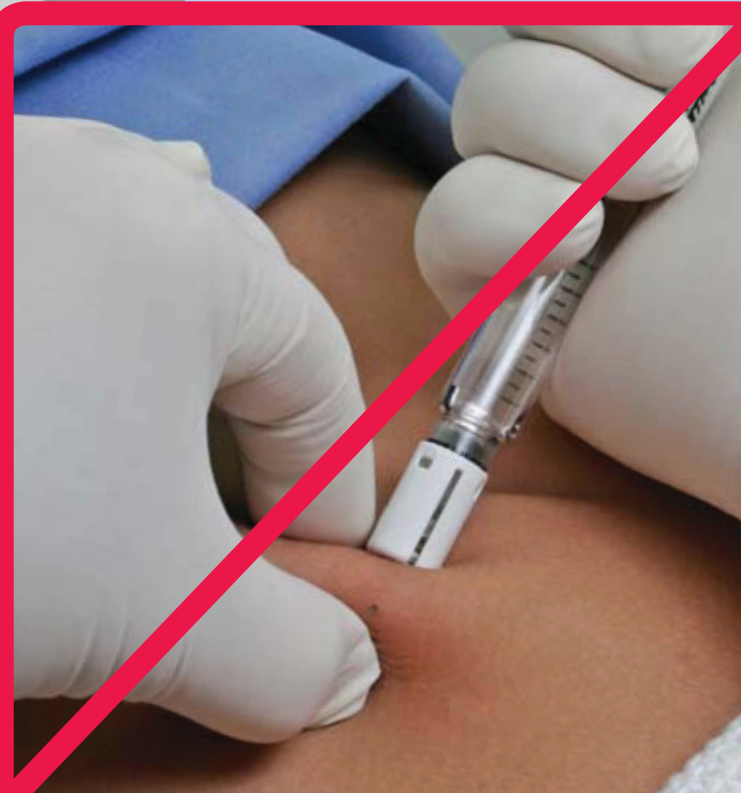

PRECAUCIÓN: Una técnica de inyección poco apropiada puede dar lugar a pinchazos accidentales

**Desechar
la aguja**

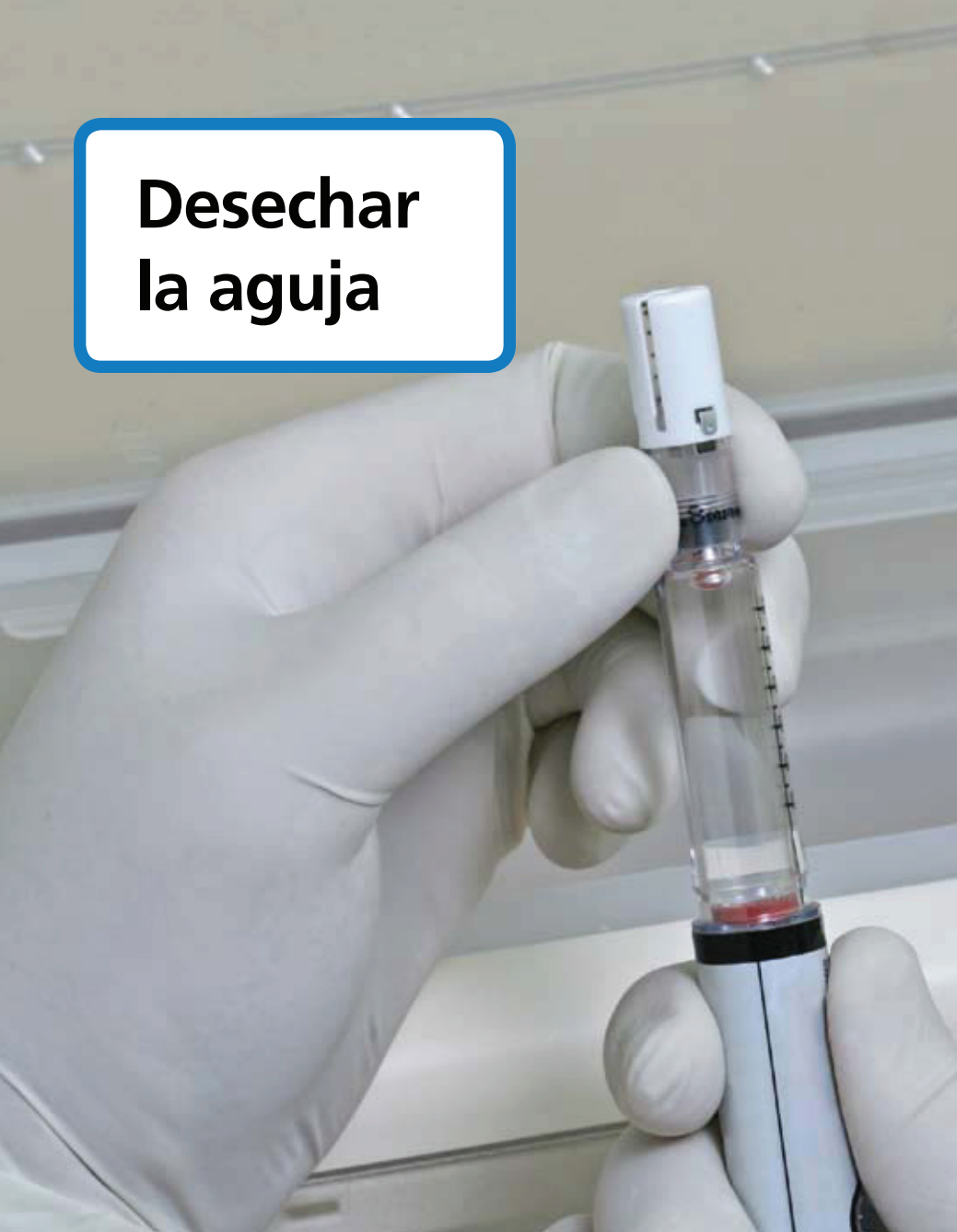



Técnica de inyección recomendada para agujas de 8mm y 5mm

1. No utilizar la técnica del pellizco
2. Sujetar la pluma con la palma de la mano
3. Insertar la pluma formando un ángulo de 90° con la piel



Ángulo Incorrecto





Técnica alternativa sólo para agujas de 8mm

1. Utilizar la técnica del pellizco cogiendo una área amplia de la piel
2. Sujetar la pluma con la palma de la mano cogiendo una área amplia de la piel
3. Insertar la pluma formando un ángulo de 90° con la piel



PRECAUCIÓN: Una técnica de inyección poco apropiada puede dar lugar a pinchazos accidentales

